

CROMOGÉNICO UTI AGAR



USO PROPUESTO

El medio de cultivo cromogénico UTI medio selectivo y diferencial para la identificación presuntiva y diferenciación de bacterias causantes de infecciones urinarias. Se encuentra adicionado con una mezcla cromogénica, X-Glucosido que tiene como blanco la actividad enzimática de β -glucosidasa específica de *Enterococcus* y Rosa-Galactosido como blanco de la enzima β -galactosidasa producida por *E.coli*. y fenilalanina y triptófano, como indicadores de la actividad del triptófano deaminasa



PRESENTACIÓN

Caja x 10 unidades de placas de Petri listas para uso.

Caja x 20 unidades de placas petri listas para usar



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD DE REACTIVOS

El medio de cultivo debe ser conservado a una temperatura de 4-8°C, en su empaque original, evitando la exposición a la luz directa, no debe ser congelado con el fin de preservar el medio.



ESPÉCIMEN O MUESTRA

Muestras de orina, de sonda, punción vesical suprapúbica o parte media de la micción



PROCEDIMIENTO

Identificar la muestra a sembrar, inocular el medio de cultivo por agotamiento utilizando asa calibrada de 10 μ l, incubar en aerobiosis, a 35-37 °C durante 18 a 24 horas.



INDUSTRIA NACIONAL
DE MICROBIOLOGÍA